

Vážení čitatelia.

September je mesiacom veľkých zmien. Školopovinným deťom skončili letné prázdniny a začal sa nový školský rok. Aj príroda sa mení – začína sa výraznejšie skracovať deň a predlžovať noc, aby sa 23. septembra mohli stretnúť v rámci jesennej rovnodennosti. St'ahovavé vtáky v septembri odlietajú do teplých krajín – na oblohe vídame krdle husí, kačíc, bocianov... Malé spevavce tiež odlietajú, ich jesenný t'ah nie je taký nápadný. Pre poľovníkov príroda pripravila krásne obdobie – začína sa jelenia ruja.

Naši predkovia na Michala (29. 9.) končili vonkajšie práce okolo gazdovstva a gazdiné mohli zasadiť k pradeniu. Často sa k tomuto dátumu aj výraznejšie ochladilo, ba objavil sa aj prvý sneh. Odtiaľ potom pranostika „Michal – snehom kýchal“.

A čo sme vám pripravili do septembrového čísla Heliosu my?

- **SpeediCath - katétre pre potreby každého užívateľa**
- **Ako je to s dostupnosťou katétrov a vreciek?**
- **Cievkovanie detí – príbeh zo života**
- **Z cestovateľského zápisníka Kristínky Pechovej**

Prajeme Vám príjemné čítanie!

Tím Coloplast A/S



SpeediCath®

Katétre, ktoré sa prispôsobujú potrebám užívateľov

SpeediCath® - značka jednorazových katétrov s unikátnym hydrofilným povrchom oslávila nedávno svoje 15. výročie. Katétre počas týchto rokov prešli viacerými zmenami, inováciami a vylepšeniami, ktoré vychádzali predovšetkým z podnetov od ich užívateľov. Podme spoločne preskúmať jednotlivé modely a to, čo svojim užívateľom prinášajú.

Nenájdete dvoch používateľov katétrov, ktorí by žili úplne rovnaký život, prípadne čelili rovnakým životným výzvam. Preto je nemožné vyvinúť jeden typ katétra, ktorý by vyhovoval každému. V prvom rade je potrebné rešpektovať pohlavie a vek užívateľa katétrov, pretože ženy a dievčatá majú kratšiu močovú rúru ako chlapci a chlapi. Prvé a základné rozdelenie katétrov je preto podľa tohoto kritéria – na mužské, ženské, chlapčenské a detské.

SpeediCath® Standard priniesol do samocievkovania vyšší štandard. Predstavuje typ katétra, ktorý je **pripravený na okamžité použitie** po jeho rozbalení. Je to vďaka unikátnemu **hydrofilnému povrchu**, ktorým je katéter rovnomerne potiahnutý. Staršie technológie vyžadovali aktiváciu povrchu katétra vodou – užívateľ pred použitím katétra musel do jeho obalu naliať vodu a čakať cca 30 sekúnd až minútu, aby bol povrch katétra dostatočne „klzký“ a dal sa použiť. Obmedzujúce? Asi áno – hlavne keď ste na miestach bez vody...



SpeediCath® Compact vznikol preto, aby mohol svojim užívateľom priniesť **vyššiu mieru diskretnosti** a kvality života. Jeho vzhľad je úplne odlišný od štandardných „dlhých“ katétrov, ktoré sú ešte zabalené v obaloch kombinujúcich papier, plast a hliník. Kompaktné katétre svojim vzhľadom pripomínajú pero, fixku, dámsku maskaru, alebo rúž – všetko možné, len nie zdravotnú pomôcku! **Jednoducho sa nosia** vo vrecku, v kabelke a svojim užívateľom priniesli do života **vyšší komfort** a diskretnosť. Okrem toho – sú celé len z plastu a teda aj ľahko recyklovateľné, čím výrazne **znižujú dopad na životné prostredie**.

Navyše – ich konštrukcia umožňuje po použití katétra tento späť uzatvoriť do plastového puzdra, čím vzniká **uzavretý bezpachový systém**. Po použití katétra ho v podstate môžete v ruke alebo vo vrecku vyniesť z toalety bez toho, aby ste sa pokvapkali, ušpinili. Je to veľký posun vpred v oblasti hygieny cievkovania sa.





SpeediCath® Compact Set predstavuje pevné spojenie kompaktného katétra a zberného vrečka na moč. Prišiel na svet, aby splnil potreby tých užívateľov katéтров, ktorí sa nechcú alebo nemôžu cievkovať na toalete. Je vhodný všade tam, kde toaleta nie je nablízku: na cestách, pri presunoch v aute a podobne.

Tiež oslovuje skupinu ľudí, ktorí sú ležiaci na lôžku a o ich cievkovanie sa stará rodinný príslušník.

Robustnejšie plastové telo katétra umožňuje jeho dobré držanie a pohodlnejšiu manipuláciu s ním aj ľudom, ktorí majú zníženú pohyblivosť a obratnosť rúk. Svojim vzhľadom tiež nepripomína zdravotnú pomôcku a tak sa stará o vysokú mieru diskretnosti pre svojich užívateľov.

Zberné vrečko na moč má objem 750 ml.



Môže Váš výber katétra zlepšiť Vaše zdravie?

Ten správny katéter – alebo katétre, môžu mať závažný vplyv na Vašu kvalitu života. Výskumy potvrdili, že ľudia, ktorí si našli katéter, s ktorým boli spokojní, dokázali samocievkovanie vykonávať správne a tak často, ako im to doporučil lekár. U tejto skupiny užívateľov bol zaznamenaný nižší výskyt infekcií močových ciest a lepšie zdravie močového traktu.

Štyria užívatelia katérov vysvetľujú svoj výber takto:



Hygienický faktor

Kevan Baker (57r.) je dlhodobý používateľ katérov. Bol vždy veľmi frustrovaný, keď sa pri použití katétra dotkol nechtiac rukami jeho povrchu. Vyskúšal rôzne značky katérov predtým, ako sa mu do rúk dostal katéter **SpeediCath Flex**. Keď mu zdravotná sestra predviedla, ako sa katéter správne používa a aké výhody prináša, rozhodol sa ho vyskúšať..

„Nedotknúť sa počas katetrizácie rukou katétra je pre mňa tá najpodstatnejšia vec. Vysoká miera hygieny je to, čo musí stáť medzi vaším katétrom a vaším telom“.



Lepšia kvalita života

Diskrétnosť hrá veľkú rolu v živote každého človeka s katetrizáciou, ktorý pracuje a chodí do spoločnosti. Pre otca dvojčiek – Daniela (36r.) je rozhodujúci nenápadný vzhľad a malé rozmery mužského katétra **SpeediCath Compact**.

„Pre mňa ako pacienta s diagnózou roztrúsená skleróza je diskrétnosť veľmi dôležitá. Nikto v práci a v mojom okolí nemusí vedieť, že na vyprázdňovanie mechúra používam katéter. SpeediCath Compact pre mužov predstavuje pre mňa optimálne riešenie. Vďaka nemu som katetrizáciu ako takú prijal do života“.



Najdôležitejšia je jednoduchosť použitia

Pre Tomáša (26r.) je najpraktickejšou variantou spojenie katétra s vreckom na moč. **SpeediCath Compact Set** je skutočne jednoduchý pre aktívny život.

„Nepotrebujem ho lubrikovať, je dostatočne malý, praktický na cesty. A na cestách som pomerne často. Vzhľadom nepripomína žiadnu cievku, hadičku či také čosi – môžem ho mať v aute v skrinke alebo vo dverách, nikto si ho nevšimne. A keď príde jeho čas – jednoducho ho vezmem a použijem tam, kde momentálne som“.



Prečo na dizajne záleží?

Monika (56r.) je aktívna žena a svojmu životnému štýlu podriadila aj výber katétra. **SpeediCath Compact** je pre ňu ten pravý.

„Cievkovanie ako také ma dost' obťažovalo, až do doby, kedy som objavila kompaktný katéter pre ženy SpeediCath Compact. Odvtedy už nemusím v kabelke nosiť niečo, čo pripomína zmotanú hadičku a čo z nej vypadne vždy ako prvé, keď v kabelke niečo hľadáte. Tento typ kompaktného katétra je v súlade s mojou ženskosťou“.



Chcete aj vy vyskúšať niektorý pre Vás nový typ katétra? Zavolajte na **bezplatnú infolinku 0800 159 159** a nechajte si poradiť.

Katétre, zberné vrecká a urinálne kondómy Ako sa dostať k zdravotnej pomôcke?

Povedal vám lekár - urológ, že vzhľadom na svoj zdravotný stav budete musieť vyprázdňovať svoj močový mechúr pomocou jednorazového katétra? Koľko katéetrov budete potrebovať na mesiac? Koľko vám ich môže predpísať váš urológ? A môže vám katétre predpisovať aj váš obvodný lekár?

Podobné otázky a samozrejme aj mnohé iné sa vám vynoria v mysli, keď budete riešiť otázku ako sa dostať k svojim zdravotným pomôckam. A na koľko čoho mesačne máte vlastne ako poistenec zdravotnej poisťovne nárok?

Otázka prvá: Koľko katéetrov na mesiac mi môže urológ predpísať?

Pri diagnóze „chronická retencia moču“, pri ktorej vám urológ predpísal samocievkovanie ako metódu na úplné vyprázdnenie močového mechúra, máte na Slovensku nárok štandardne na **120 kusov katéetrov mesačne**. Znamená to, že by ste sa mali cievkovať v priemere **4 x za deň**. Ak vám táto frekvencia a množstvo katéetrov na mesiac stačí – nepotrebujete absolvovať žiadne ďalšie špeciálne urologické vyšetrenie.



Ak sa však potrebujete cievkovať častejšie – napríklad **5 až 6 krát denne**, musíte absolvovať **urodynamické vyšetrenie**. Až po jeho úspešnom absolvovaní a ak to

výsledky vyšetrenia preukážu, vám môže urológ predpísať **150 až 180 kusov katéetrov** na mesiac. Toto vyššie množstvo pomôcok však musí urológ zdôvodniť (podložiť výsledkami vyšetrenia) vašej zdravotnej poisťovni.

Výnimka, udelená poisťovňou **bude platiť jeden rok** – čo znamená, že rovnaké urodynamické vyšetrenie u urológa budete musieť absolvovať každý rok.

Otázka druhá: Môže mi urológ ku katétrom predpísať aj nejaké výpustné vrecká na moč? Ak áno – koľko?

Odpoveď je áno. Jednoduchou voľbou je nechať si predpísať katétre s vreckom **SpeediCath Compact Set**. Vrecko pri tomto katétre má objem **750ml**.

Ak je pre vás lepšia varianta pripájať si zberné vrecko ku katétru len vtedy, keď to naozaj potrebujete, môže vám urológ predpísať tzv. denné vrecká v kombinácii s nočným vreckom.

Denné vrecká Conveen majú objem od 350 do 750 ml a máte nárok na **20 kusov** takýchto vreciek mesačne. Ich výhodou je, že sa dajú ľahko vypúšťať pomocou výpustného ventilu (nemusíte namáhať vrecko „roztrhnúť“). Jedno vrecko tak môžete použiť viackrát. K denným vreckám vám urológ môže predpísať aj tzv. **nočné vrecko Conveen** – má kapacitu až 1 500ml a máte nárok na **10 kusov** za mesiac.



Otázka tretia: Môže mi urológ na mesiac predpísať len jeden typ katéetrov, prípadne jeden typ vreciek?

Jediným limitujúcim faktorom je množstvo zdravotných pomôcok, na ktoré máte nárok na mesiac. Urológ vám teda môže predpísať napríklad dva typy katéetrov (SpeediCath Compact na doma, Compact Set na cestovanie) – len musí dodržať limit – napríklad 120 ks spolu.

Rovnako si môžete nechať predpísať aj viac typov denných vreciek (napríklad 350 ml spolu so 750 ml) – len ich počet nesmie presiahnuť limit 20 ks za mesiac.



SpeediCath® Flex

Jednoduchosť v každom detaile



SpeediCath® Flex

Získajte vzorky a vyskúšajte si ho už dnes!

Zavolajte na bezplatné číslo **0800 159 159** a nechajte si bezplatne poslať vzorky na vyskúšanie domov.

Otázka štvrtá: Môže mi katétre a vrecká k nim predpisovať len urológ?

Nie, nemusí to byť len urológ. Závisí to od toho, v akých intervaloch vám urológ naplánoval kontroly v urologickej ambulancii a či pri každej kontrole vám plánuje aj predpísať pomôcky. Urológ môže vydať odporúčenie na predpis pomôcok obvodnému lekárovi pre dospelých (alebo pediatrovi) – na základe tohoto odporúčenia potom môže predpisovať katétre a vrecká aj obvodný lekár. Odporúčanie lekára – špecialistu platí jeden rok.

Vzor odporúčenia nájdete za týmto článkom – prípadne ak zavoláte na našu bezplatnú linku **0800 159 159**, môžete si ho vyžiadať spolu s brožúrkou „Život s intermitentnou katetrizáciou“ ktorú vám bezplatne pošleme.

Otázka piata: Môže mi lekár k pomôckam na katetrizáciu predpísať aj nejakú kozmetiku – na ošetrovanie a čistenie okolia močovej rúry?

Nie, žiaľ na kozmetiku, čistiace obrúsky a podobne nemáte zo zdravotného poistenia nárok pokiaľ vykonávate samocievkovanie. V našom portfóliu však nájdete špeciálnu kozmetiku, ktorú používajú pacienti so stómiou (napr. aj s urostómiou, nefrostómiou..) a ktoré si môžete vo výdajni zdravotných pomôcok kúpiť.

Pre viac informácií zavolajte na našu bezplatnú infolinku **0800 159 159**



Doporučenie pre praktického lekára

SpeediCath

Jednorazové hydrofilné katétre

Poistovňa

--	--	--	--

Meno

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rodné číslo

--	--	--

Diagnóza

Doporučujem:

SpeediCath Compact Set:

mužský, veľkosť

12/18 CH/mm

(120 ks)

B95065

ženský, veľkosť

10, 12, 14 CH/mm

B95066

SpeediCath Compact katétre

mužský, veľkosť

12/18 CH/mm

(120 ks)

B91009

ženský, veľkosť

8, 10, 12, 14 CH/mm

B91010

Vrecko na zber moču SpeediBag Compact 700 ml k ženským katétrom

(20 ks)

B92050

SpeediCath Flex

mužský, veľkosť

10, 12, 14, 16 CH/mm

(120 ks)

B98011

--

Dátum

--

Pečiatka

SpeediCath katétre

(120 ks)

mužský, Nelaton, veľkosť	<input type="checkbox"/> 8, <input type="checkbox"/> 10, <input type="checkbox"/> 12, <input type="checkbox"/> 14, <input type="checkbox"/> 16, <input type="checkbox"/> 18 CH/mm	<input type="text"/>	B97038
mužský, Tiemann, veľkosť	<input type="checkbox"/> 10, <input type="checkbox"/> 12, <input type="checkbox"/> 14, <input type="checkbox"/> 16 CH/mm	<input type="text"/>	B97039
ženský, veľkosť	<input type="checkbox"/> 8, <input type="checkbox"/> 10, <input type="checkbox"/> 12, <input type="checkbox"/> 14, <input type="checkbox"/> 16 CH/mm	<input type="text"/>	B81855
detský, veľkosť	<input type="checkbox"/> 6, <input type="checkbox"/> 8, <input type="checkbox"/> 10 CH/mm	<input type="text"/>	B81856
chlapčenský, veľkosť	<input type="checkbox"/> 8, <input type="checkbox"/> 10, <input type="checkbox"/> 12 CH/mm	<input type="text"/>	B97040

EasiCath katétre s LuerLock konektorom mužské

(120 ks)

mužský, Nelaton, katéter	<input type="checkbox"/> 10 CH/mm	<input type="text"/>	B40789
mužský, Nelaton, katéter	<input type="checkbox"/> 12 CH/mm	<input type="text"/>	B40790
mužský, Nelaton, katéter	<input type="checkbox"/> 14 CH/mm	<input type="text"/>	B40791

EasiCath katétre s LuerLock konektorom ženské

(120 ks)

ženský katéter	<input type="checkbox"/> 10 CH/mm	<input type="text"/>	B40789
ženský katéter	<input type="checkbox"/> 12 CH/mm	<input type="text"/>	B40790
ženský katéter	<input type="checkbox"/> 14 CH/mm	<input type="text"/>	B40791

Pomôcky pre autokatetrizáciu – štandardný počet štyroch denných cievkovaní (120 ks za mesiac) je možné zvýšiť na päť (**150 ks za mesiac**) maximálne šesť cievkovaní denne (**180 ks za mesiac**) ak počas každoročného urodynamického vyšetrenia presiahne tlak detruzora 40 cm vodného stĺpca pri objeme nižšom ako 400 ml.

Niekoľko praktických príkladov kombinácií katétrov SpeediCath® pre ženy:

1. Užívateľka – pani v strednom veku, chodí každý deň do práce. Katetrizuje sa 4-krát denne, z toho raz ráno na toalete a potom v priebehu dňa trikrát mimo domu, ale na toalete. Ráno jej stačí použiť štandardný katéter, ale počas dňa na pracovisku a v spoločnosti potrebuje veľmi diskkrétne a nenápadné katétre. Jej urológ jej na mesiac predpisuje 120 kusov katétrov takto:



SpeediCath®
30 ks/mesiac



SpeediCath® Compact
90 ks/mesiac

2. Užívateľka – mladšia žena, žije veľmi aktívnym pracovným aj spoločenským životom. Katetrizuje sa 4krát denne, veľmi často v práci a na cestách mimo toalety. Uprednostňuje vzhľadom nenápadné katétre, ktoré sa dajú dobre nosiť v kabelke. Pri katetrizácii mimo toalety potrebuje katéter so zberným vreckom. Jej urológ jej na mesiac predpisuje 120 kusov katétrov takto:



SpeediCath® Compact
30 ks/mesiac



SpeediCath® Compact Set
90 ks/mesiac

Poskladajte si vlastnú kombináciu jednorazových katétrov !

**Prispôbte si typ a množstvo katétrov
vášmu životnému štýlu !**

Poradíte sa so svojim urológom pri predpise katétrov a povedzte mu o vašej predstave.




Ak si chcete vyskúšať niektorý typ katétra SpeediCath, zavolajte na bezplatnú infolinu spoločnosti Coloplast a požiadajte o bezplatné zaslanie vzorky.

Vzorku katétra si môžete bezplatne objednať aj online! Je to jednoduché – pomocou aplikácie vo vašom smartfóne nasnímajte QR kód, otvorte webovú stránku a vyplňte formulár.

Niekoľko praktických príkladov kombinácií katétrov SpeediCath pre mužov:

1. Užívateľ muž, samocievkuje sa 4krát denne. Na mesiac potrebuje **120 kusov jednorazových katétrov**. Žije aktívnym životom, ráno a večer sa katetrizuje doma na toalete, v priebehu dňa sa katetrizuje dvakrát mimo domu a toalety. Jeho urológ mu predpisuje:

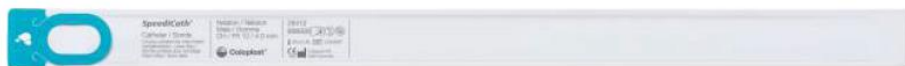

SpeediCath® Standard
60 ks/mesiac



SpeediCath® Compact Set
60 ks/mesiac

2. Užívateľ mladý muž, samocievkuje sa 4krát denne. Na mesiac potrebuje **120 kusov jednorazových katétrov**. Žije aktívnym životom, v zamestnaní cestuje, často chodí do spoločnosti. Potrebuje katétre s diskretným vzhľadom, málo nápadné. Jeho urológ mu predpisuje:



SpeediCath® Compact Set
60 ks/mesiac



SpeediCath® Compact
60 ks/mesiac

3. Užívateľ starší muž, samocievkuje sa 4krát denne. Na mesiac potrebuje **120 kusov jednorazových katétrov**. Je málo mobilný, väčšinu dňa preleží na lôžku. Katetrizuje ho manželka na lôžku – mimo toalety, uprednostňuje katéter so zberným vreckom na moč. Jeho urológ mu predpisuje:



SpeediCath® Compact Set
120 ks/mesiac

Cievkovanie dieťaťa – príbeh zo života

Do schránky nášho zákazníckeho servisu prišiel jeden veľmi pekný mail. So svojimi skúsenosťami ohľadom katetrizácie svojej dcéry sa chce s vami podeliť pani Zuzana Valette, ktorej touto cestou ďakujeme a vyslovujeme úprimný obdiv za odvahu a chuť písať o takejto intímnej téme. Ďakujeme v mene všetkých čitateľov.

Milí čitatelia Heliosu,

som mama 8-ročného dievčatka na invalidnom vozíku, ktoré cievkujeme.

Od narodenia sme si prešli kadečím. Dnes sa cievkuje **6x denne** a v noci spí so zavedeným katétrom.

Znie to obmedzujúco a desivo, ale našli sme si systém a naozaj dodržiavame dvojhodinové intervaly medzi jednotlivými ČIK-mi. Chodíme von, do školy, na krúžky, v lete plávame, cestujeme, športujeme, snažíme sa robiť všetko bez obmedzení.

Keďže si uvedomujeme, ako je cievkovanie a vyprázdnenie mechúrika dôležité, cievkovali sme sa už naozaj na rôznych miestach : v aute, na tráve, na letiskách... Najlepšie v ľahu, ale keď sa inak nedalo (kde na letiskách napríklad nájdeme posteľ, aby si dievča v jej veku mohlo ľahnúť), zvládli sme to aj po sediačky vo vozíku.



Ilustračné foto

Nie je to vždy jednoduché, ale chcem povzbudiť všetkých rodičov, ktorí majú obavy z cievkovania, že najväčší strach máme možno v hlave. Fyzicky vycievkovať nie je naozaj nič. Nám to trvá asi 5 minút aj s prípravou a oblečením.

Taktiež pozvoľna nacvičujeme samocievkovanie, čo nám uľahčí napríklad pobyt v škole.

Povzbudivý bol pre nás článok v minulom čísle Heliosu, kde sme sa dočítali, že aj slepé ženy sa naučili vycievkovať samé. Tak naozaj nie je dôvod, aby to nezvládli všetci tí, ktorí to potrebujú.

Držím vám palce, a prajem veľa zdravia a úspechov pri cievkovaní !

Zuzana Valette



**Katetrizácia vôbec
nie je tak zložitá**

Gepard Speedi a jeho priatelia
vám ukážu ako na to

 **Coloplast**

Milí rodičia, ak ešte nemáte praktickú príručku, ktorá vám pomôže naučiť vaše dieťa sa cievkovať, zavolajte na **0800 159 159**

Z cestovateľského zápisníka Kristínky Pechovej

Kristínka Pechová je veľká cestovateľka. Veľmi často od nej dostávame správy, kde sa práve nachádza, čo sa jej tam páči a čo zaujímavé prežila. Náš kamarát a kolega pre styk s deťmi a mládežou – gepard Speedi, zostavuje prehľad Kristínkinych ciest a aktivít.

„Milí čitatelia časopisu Helios. Opäť sa vám ozývam po dlhšom čase, pretože som bola dosť zaneprázdnená a tak ma poprosila pani Lucia, aby som napísala článok, že čo robím na mojej škole a ako sa mám..

Tak venujem sa predavčským prácam a predavač sa vzdeláva 3 roky a na konci toho ročníka dostanem aj výučný list a môžem ísť aj pracovať.

Je to veľmi náročné, ale veľmi ma to baví a baví ma tiež obsluhovať našich zákazníkov, ktorí našu školu chodia navštevovať.

Máme aj školskú reštauráciu, ktorú chodia navštevovať aj ľudia z ulice, nielen žiaci.

Milí čitatelia, doporučujem vám, aby ste navštívili veľkú Prahu a poobede sa môžete zastaviť aj na nejaký dobrý koláčik, ktorý si môžete zakúpiť v našej školskej pekárni - len za niekoľko koruniek.


Dopĺňam niektoré potrebné informácie:

Školská pekáreň je otvorená od **10:00-14:15**

A školská reštaurácia je otvorená v pondelok až piatok od **7:30 -14:00**

A pozor! Naša škola ponúka aj Kurz cukrárskeho a pekárskeho remesla!“

Vaša Kika

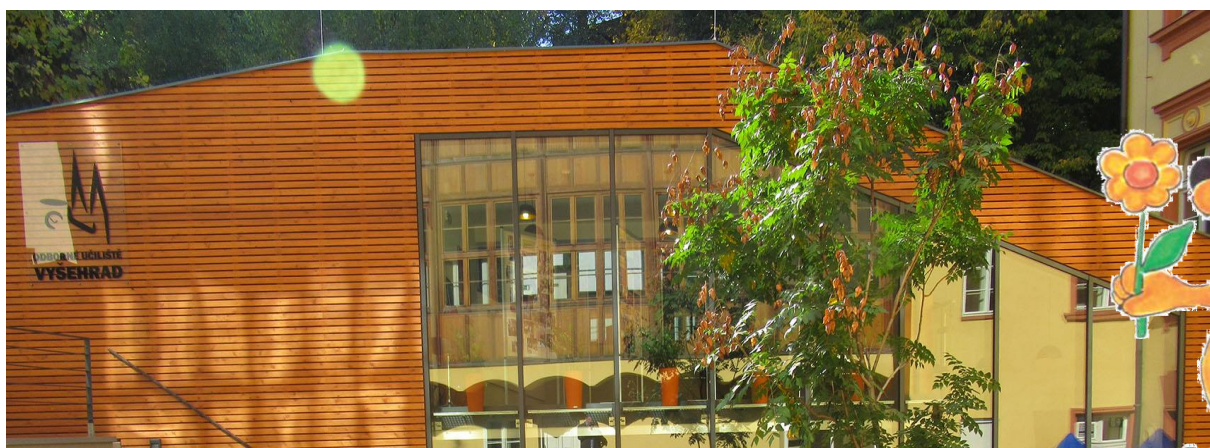



Speediho zber plastových vrchnáčikov

Speedi prichádza s novou podpornou kampaňou zameranou na zber plastových vrchnáčikov z katétrov SpeediCath Compact Set a plastových obalov z katétrov SpeediCath Flex. Kampaň má za úlohu upozorniť na ekologický dopad používania plastových katétrov – v prípade, že sa nerecyklujú!



Človek, ktorý sa musí cievkovať 4 x denne, vyprodukuje za rok **1 460 ks** použitých plastových katétrov.

Ak sa cievkujete katétramí SpeediCath Compact Set pošlite mi z nich plastové vrchnáčiky.

Ak používate katétre SpeediCath Flex – z nich mi môžete poslať šedý vonkajší plastový obal.

Za každých 360 ks vrchnáčikov, alebo šedých plastových obalov Flex, dostanete odo mňa poukážku na nákup v hodnote 20 eur.

Ako na to? Jednoducho: Ak ti doktor predpisuje 120 katétrov SpeediCath Compact Set alebo Flex na mesiac, potrebné množstvo 360 kusov vrchnáčikov z nich získaš za tri mesiace.

Zabalíš do balíčka a pošleš mi na adresu:

Coloplast A/S – gepard Speedi, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava.

Ja ti zase na adresu odosielateľa pošlem darček – **poukážku na nákup v hodnote 20 eur.**

Dievčatá a ženy, už ste mali možnosť vyskúšať SpeediCath Compact a Compact Set?

Nenápadné, šikovné, jednoducho použiteľné a vysoko hygienické jednorazové katétre, špeciálne vyvinuté pre ženy. Vo svete získali viaceré prestížne ocenenia. Oceníte ich aj vy?



Máte záujem vyskúšať SpeediCath Compact?

Je to jednoduché!

1. Zavolajte na bezplatnú zákaznícku linku Coloplast
2. Povedzte, že máte záujem o bezplatné zaslanie vzoriek katétrev SpeediCath Compact a SpeediCath Compact Set
3. Vyberte si vám primeranú veľkosť ženských katétrev
4. Na adresu, ktorú počas hovoru uvediete, Vám bezplatne pošleme po 3ks z každého Vami vybraného typu katétra



Spoločnosť Coloplast vyvíja výrobky a služby, ktoré uľahčujú život ľuďom s veľmi osobnými zdravotnými problémami. Pretože neustále komunikujeme s ľuďmi ktorí naše výrobky používajú, vytvárame riešenia, ktoré veľmi citlivo reagujú na ich mimoriadne potreby. Voláme to intímna zdravotná starostlivosť.

Naše podnikanie zahŕňa starostlivosť o stómie, pomôcky pre urológiu a inkontinenciu a starostlivosť o rany a kožu. Pôsobíme globálne a zamestnávame viac ako 7 000 ľudí.



0800159159 BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

SpeediCath, Conveen a logo Coloplast sú registrované obchodné značky spoločnosti Coloplast A/S.
Všetky práva vyhradené Coloplast A/S, Humlebaek, Dánsko. 2018-11



Coloplast A/S, o.z.z.o.
Polus Tower II
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava
www.coloplast.sk
www.kontinencia.sk